



ELASTODONZIA SU MISURA

Raccomandazioni d'uso per il paziente

- ELASTO è un dispositivo a caduta, quindi libero di muoversi in bocca. Questa sua caratteristica, attiva tutti i muscoli della cavità orale, offrendo un autentico allenamento mirato al ripristino di una corretta funzione.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Indossare di notte e almeno due ore di giorno intervallate tra di loro, se non diversamente indicato dal dentista curante.
- I primi giorni al risveglio potreste ritrovarlo nel letto, il che è normale, questa abitudine tenderà a diminuire nel corso del tempo.
- In caso di smarrimento avvertire immediatamente lo studio dentistico.
- Nelle prime due settimane potrebbe manifestarsi una dolenzia dentale e un aumento della salivazione, questi sintomi tenderanno ad attenuarsi con il proseguire del trattamento.
- Lavare con uno spazzolino, utilizzando acqua e sapone, una volta al giorno.
- ELASTO è stato progettato considerando la permuta dentale, pertanto se alcuni denti dovessero essere persi durante il trattamento non è necessario richiederne la modifica.

SCOPRI IL NUOVO ELASTOMERO PERSONALIZZATO